

ZAMAR

by




Protocole Zamar Équidés

www.vlceurope.com

info@vlceurope.com

Enveloppe de TENDON

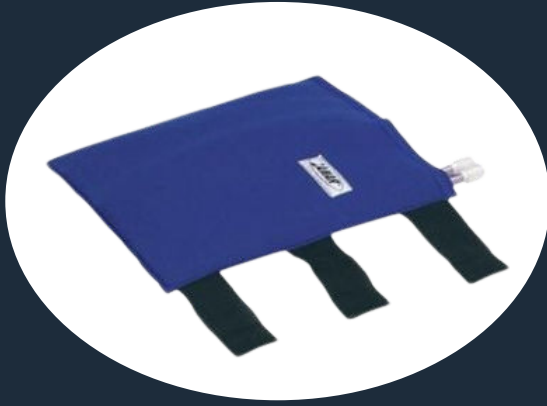

- **Prévention** : tous les jours pour une récupération après l'effort, + 2°C degrés pendant 40 minutes, soulage les tendons et évite les engorgements et les courbatures
- **Dysfonctionnement du carpe équin ou entorse du ligament** : 0°C pendant 40 minutes - deux fois par jour
- **Réduction de la douleur et de l'œdème et réparation des tissus** : +3°C, 3 fois par jour pendant 30 minutes
- **Tendinite** : 0°C deux fois par jour pendant 40 minutes, vous obtiendrez une réduction de la douleur et de l'œdème ainsi qu'une réparation des tissus.

Enveloppe de JAMBE

- **Prévention** : tous les jours après le travail, pendant 40 minutes à -2°C
 - Pour la récupération après effort, pour prévenir les inflammations
 - Pour éliminer la douleur des courbatures
 - Accélérer la réparation des tissus



Enveloppe de **JAMBE ENTIÈRE**



- Utilisé chaque jour après le travail pour la récupération à 0°C pendant 40 minutes
- **Fourbure** : -5°C pendant plusieurs heures, en froid continu sous supervision d'un vétérinaire

Enveloppe de **COU**

- **Abcès de cou** : pour faire murir l'abcès
- **Refermer les plaies** : reconstruction des tissus
- Décontraction des muscles par la chaleur ou préparation à l'effort
- **Amaigrissement du cou (PSA et QH de show)**
: +40°C pendant 40 minutes



Enveloppe d'ÉPAULE



- **Ostéochondrose chronique de l'épaule (arthrite)** : thérapie chaude à +45°C pendant 45 minutes deux fois par jour
- **Avant le travail** : augmente la mobilité de l'articulation concernée
- **Contusion de l'épaule** : en thérapie froide, à +3°C pendant 30 minutes deux fois par jour, réduction de l'œdème, réduction de la douleur et des spasmes musculaires.

COUVERTURE DORSALE

- **Utilisé à chaud** pour les douleurs musculaires du dos et en hiver avant le travail pour éviter les entorses musculaires à 45°C pendant 40 minutes améliorer la mobilité et les performances
- **Utilisé à froid** f à 0°C pendant 45 minutes en compétition d'ENDURANCE ou en été pour refroidir le cheval lorsque la température est très élevée



Enveloppe de DOS



- **Dysfonctionnement sacro-iliaque équin chronique** : pour réduire la douleur et les spasmes musculaires, accélérer la guérison des tissus par une circulation accrue en thérapie chaude à +45°C pendant 45 minutes
- **Dysfonctionnement sacro-iliaque équin aigu** : pour réduire la douleur et les spasmes musculaires, accélérer la cicatrisation des tissus en augmentant la circulation sanguine en thérapie chaude à +45°C pendant 45 minutes

Enveloppe de JARRET

- **Entorse aiguë du jarret et irritation des ligaments** : thérapie par le froid à -2°C pendant 40 minutes deux fois par jour pour réduire l'œdème et la douleur, réparer les tissus et augmenter la mobilité des articulations concernées
- **Arthrite du jarret** : thérapie chaude, à 40°C pendant 40 minutes avant le travail pour augmenter la circulation.



Enveloppe de GRASSET



- **Dysfonctionnement des articulations du grasset ou d'arthrite** : alternance chaud/froid de 0°C pendant 20 minutes puis +45°C pendant 20 minutes X 2 cycles, deux fois par jour
 - Amélioration de la mobilité de l'articulation du grasset par la réduction de la douleur et des spasmes musculaires
 - Contrôle de la poussée ostéochondritique, réduction des œdèmes, accélération de la cicatrisation des tissus par modulation de l'inflammation et augmentation de la circulation
 - Augmenter la mobilité et restaurer la fonction de l'articulation du grasset.

- **Contusion aiguë de l'articulation du grasset** : thérapie par le froid à +3°C pendant 30 minutes deux fois par jour, pour le contrôle de la douleur et la réduction de l'œdème.

Enveloppe de PIED

- **Syndrome naviculaire chronique** : en thérapie par chaud/froid à 0°C pendant 20 minutes et + 40°C pendant 20 minutes X 2 cycles, deux fois par jour.
 - Accélère la guérison des tissus
 - Réduction de la douleur
 - Réduction de l'œdème



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE THÉRAPIE

Les informations thérapeutiques contenues dans ce document sont fournies à titre d'information uniquement, et ne doivent pas être utilisées ou invoquées à des fins de diagnostic ou de traitement sans consultation préalable d'un vétérinaire. Ces informations sont destinées à être éducatives et ne doivent pas se substituer à un diagnostic et à un traitement professionnel.

Veillez consulter votre vétérinaire avant de prendre toute décision thérapeutique ou pour obtenir des conseils sur un problème spécifique.